

# Форм-карта зубов

## Ivoclar Vivadent:

Ivocryl

SR Vivodent

SR Vivodent DCL

SR Vivodent PE

SR Postaris

SR Orthotyp

SR Orthotyp DCL


SR Orthotyp PE




# Ivocryl

## Верхние фронтальные зубы


### Овальные

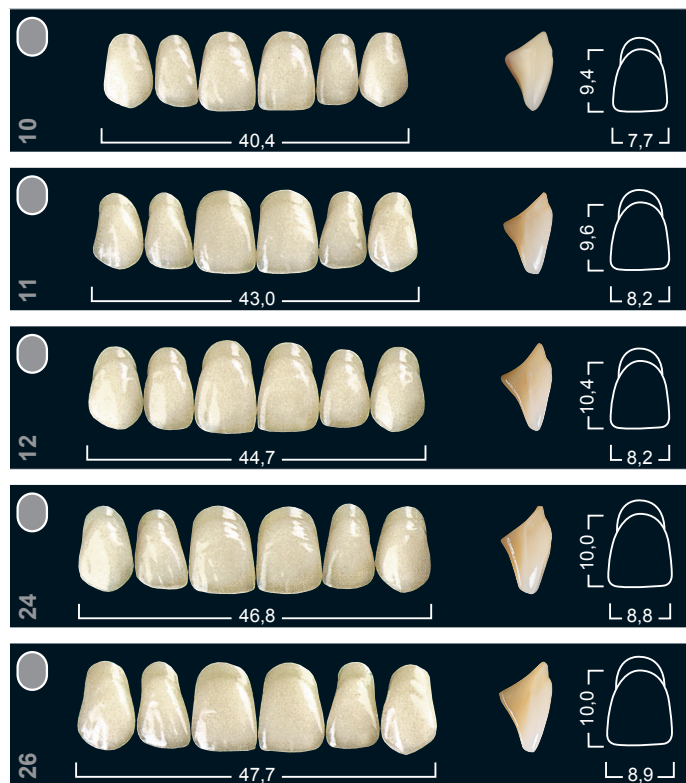

### Треугольные

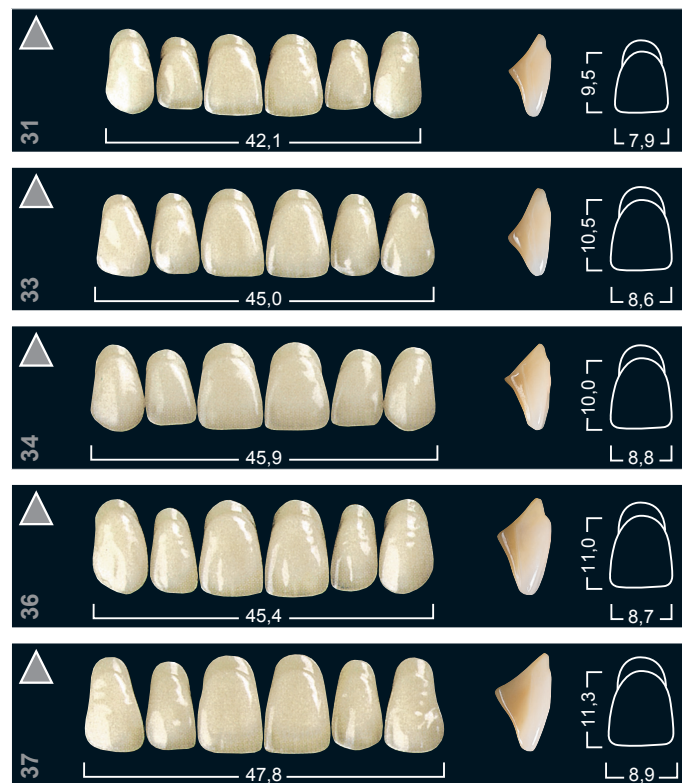

### Прямоугольные

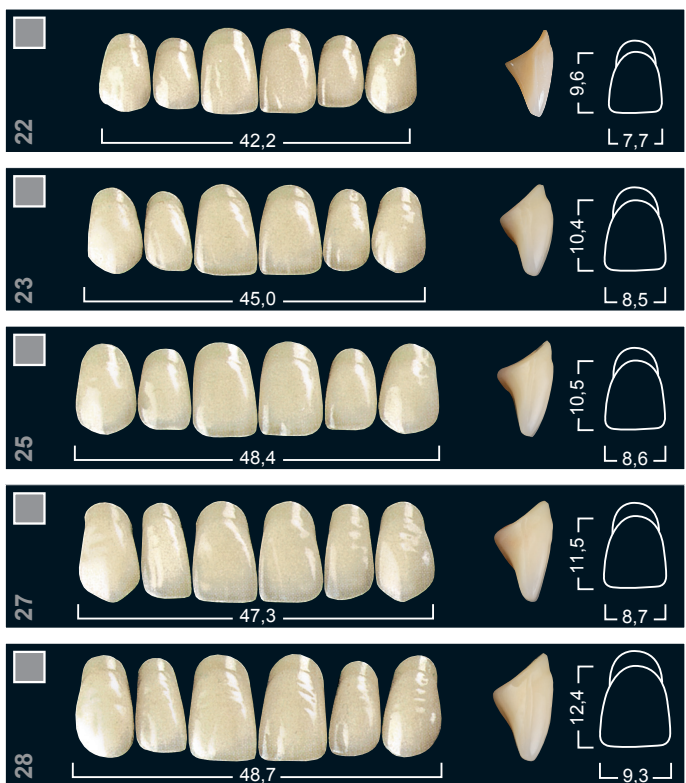

#### Критерии выбора

Существует множество методов выбора формы зубов, к которым можно отнести форму головы, строение тела и мужской или женский тип.

Однако, дополнительно к этому, если информация о размере, форме и расположении зубов полностью отсутствует, за исходные данные можно принять форму верхней челюсти. Из большого числа форм верхней челюсти принципиально можно выделить три основных типа:

- овальная
- треугольная
- прямоугольная

Верхние фронтальные зубы Ivocryl по их анатомическому строению подразделяются на три основные группы:

#### Овальная форма зубов

Эта группа характеризуется сильными изгибами, которые проявляются, прежде всего, в выраженном лабиальном изгибе. Овальная форма альвеолярного гребня чаще всего встречается в случаях с глубоким прикусом.

#### Треугольная форма зубов

Эта группа отличается узкими зубами, с сужающейся в цервикальной области формой коронковой части. Вертикальный лабиальный изгиб выражен средне. Центральный резец имеет треугольную форму. Альвеолярный гребень также имеет треугольную форму и указывает на вероятность перекрестного прикуса.

#### Прямоугольная форма зубов

Такие зубы имеют скорее прямоугольную форму. Центральный резец доминирует. Вертикальный лабиальный изгиб выражен слабо. Альвеолярный гребень имеет выраженную прямоугольную форму и указывает на ортонатический и прикус.

# Нижние фронтальные зубы

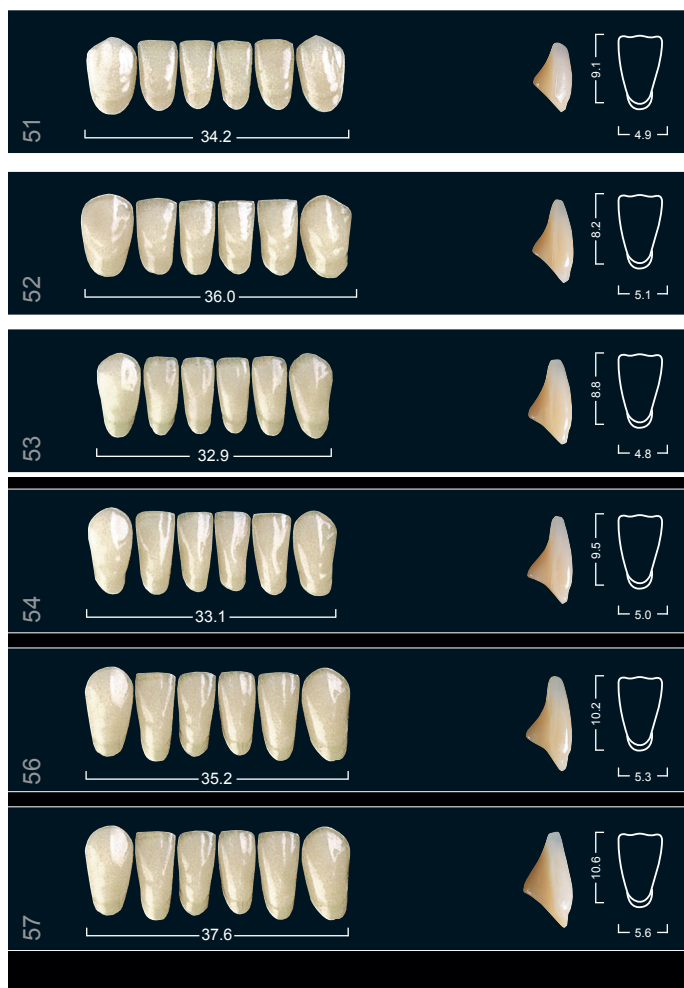


Таблица комбинирования

Форма	Фронтальные зубы		Боковые зубы
	Верхние	Нижние	
○	10	51/53	28/89
	11	51/53	28/29
	12	52/56	30
	24	52/56	30
	26	52/56	30/32
△	31	53/54	28/29/31
	33	52/56	30/32
	34	52/56	30
	36	54/56	30/32
	37	56/57	30/32
■	22	54	28/31
	23	56	30/32
	25	57	32
	27	54/56	32
	28	57	32


Формы фронтальных зубов 10, 23, 25, 27 и 28, а также боковых зубов 29 и 31 выпускаются только в цветах Bleach и A-D.

# Передние зубы


SR Vivodent®PE / SR Vivodent®DCL / SR Vivodent®

## Маленькие

### SOFT

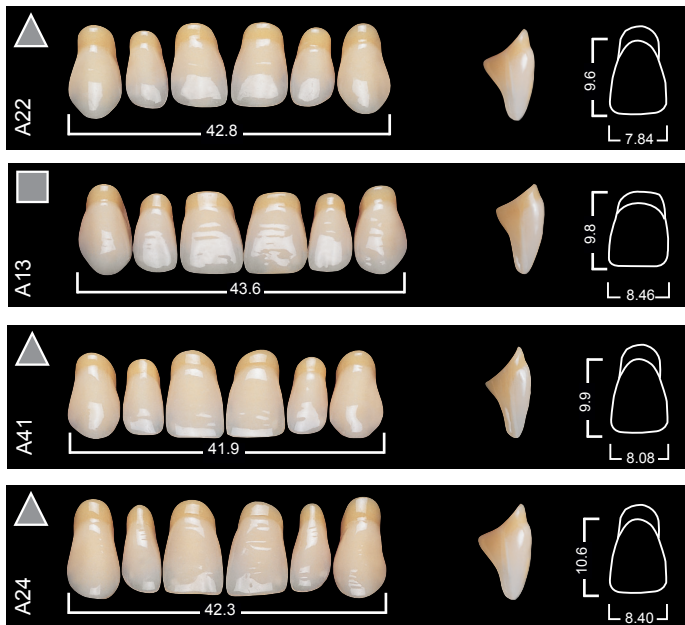


### Bold

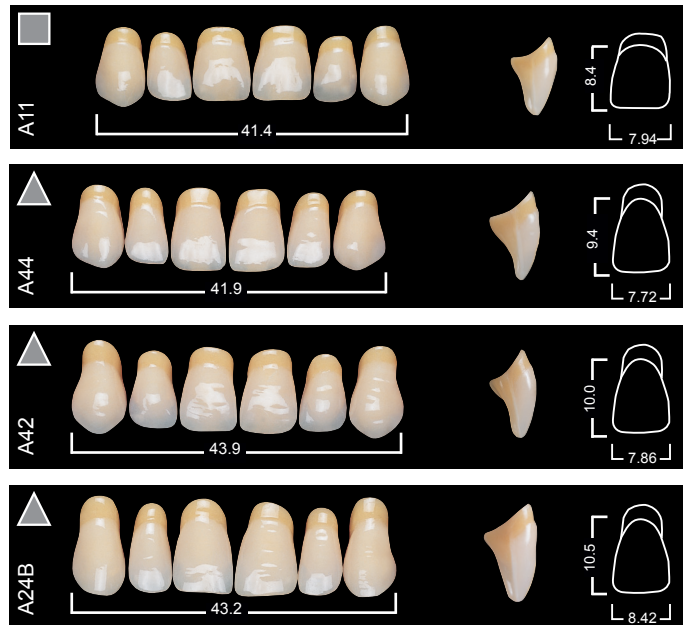


## Средние

### SOFT

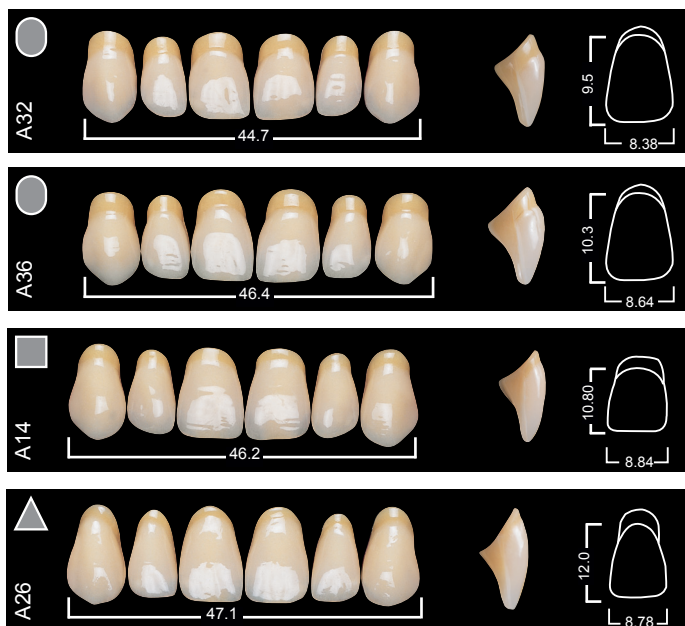

### Bold

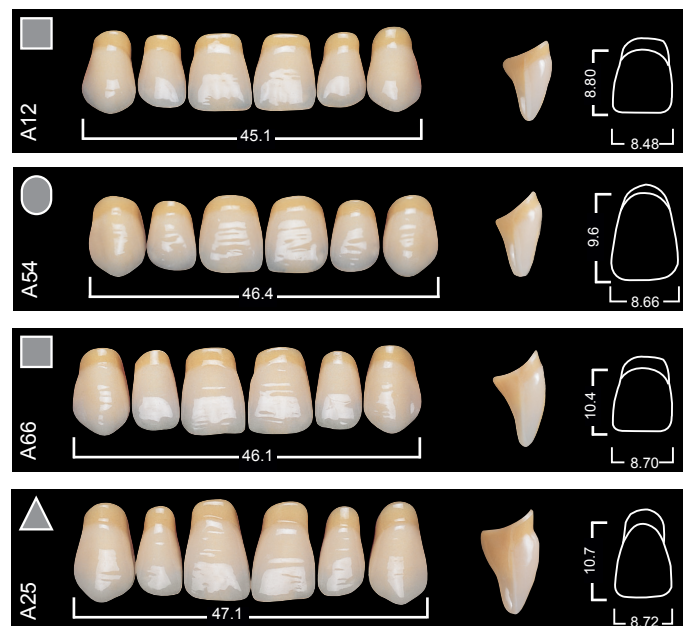


# Передние зубы


SR Vivodent®PE / SR Vivodent®DCL / SR Vivodent®

## Крупные



### SOFT

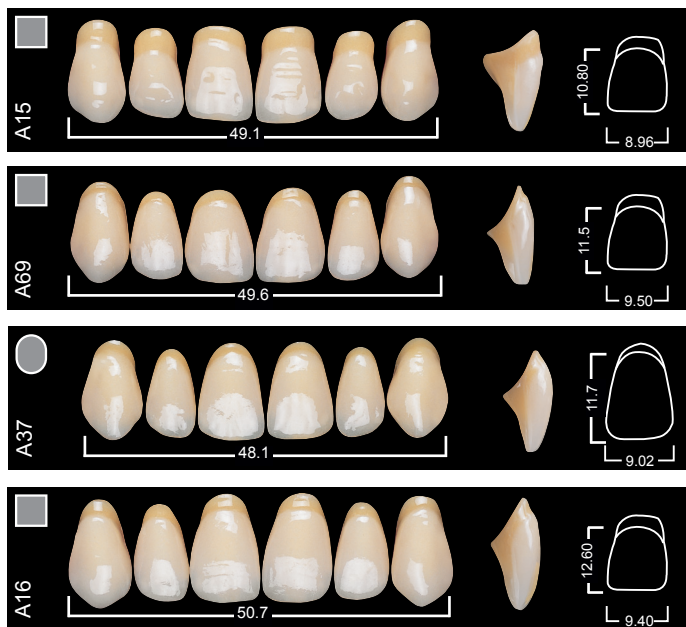

### Bold

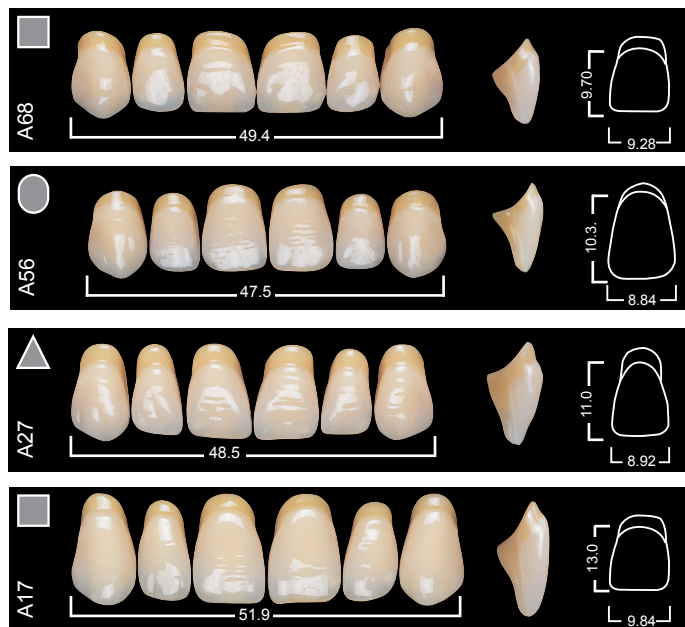

# Нижние фронтальные зубы

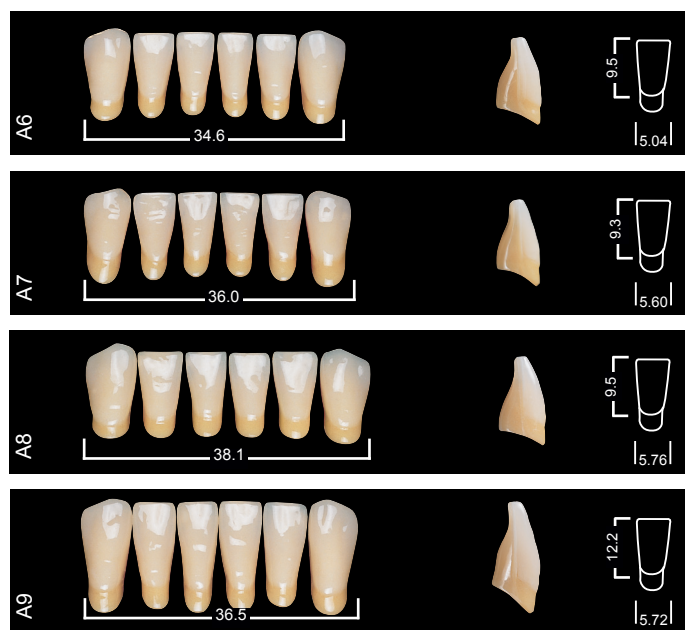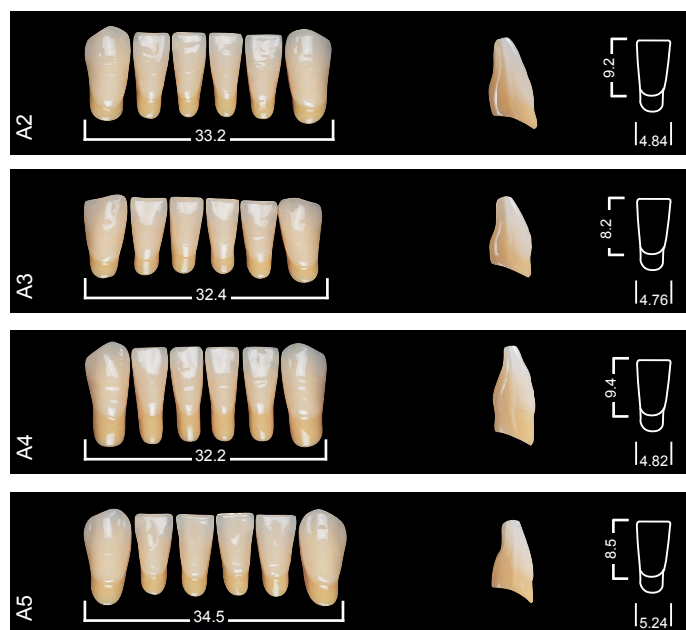


Следующие формы недоступны: SR Vivodent: A16, A26, A37, A69

# Боковые зубы


SR Orthotyp®PE / SR Orthotyp®DCL / SR Orthotyp®

N-форма для нормального прикуса

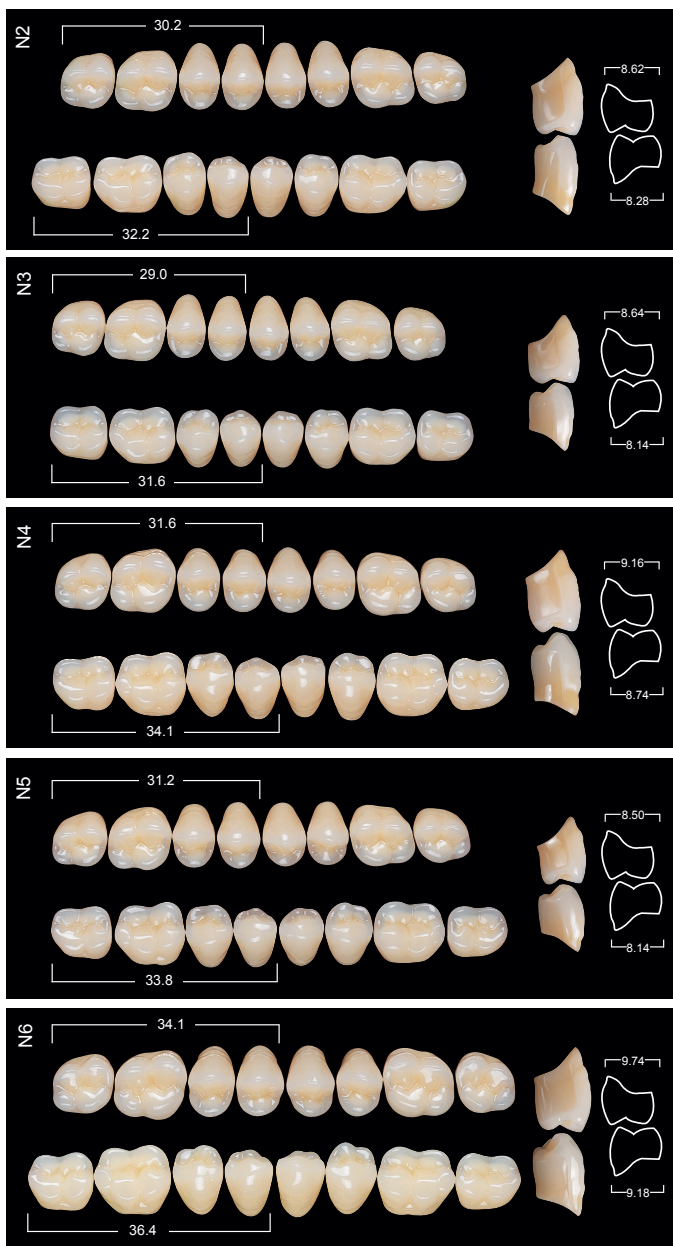


## SR Orthotyp®PE

T-формы для глубокого прикуса

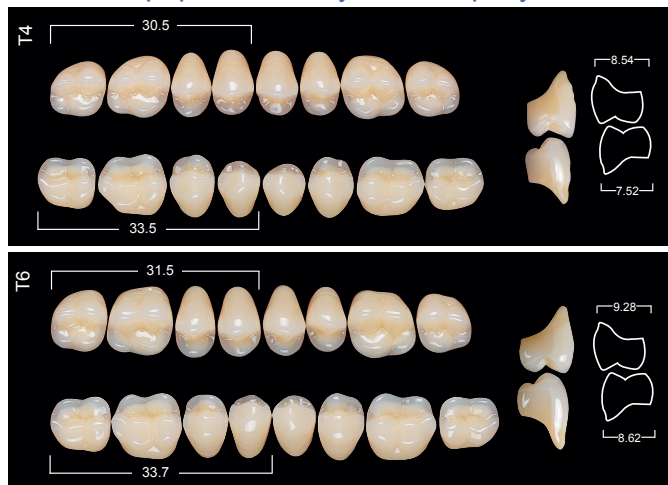


# Боковые зубы

SR Postaris®DCL

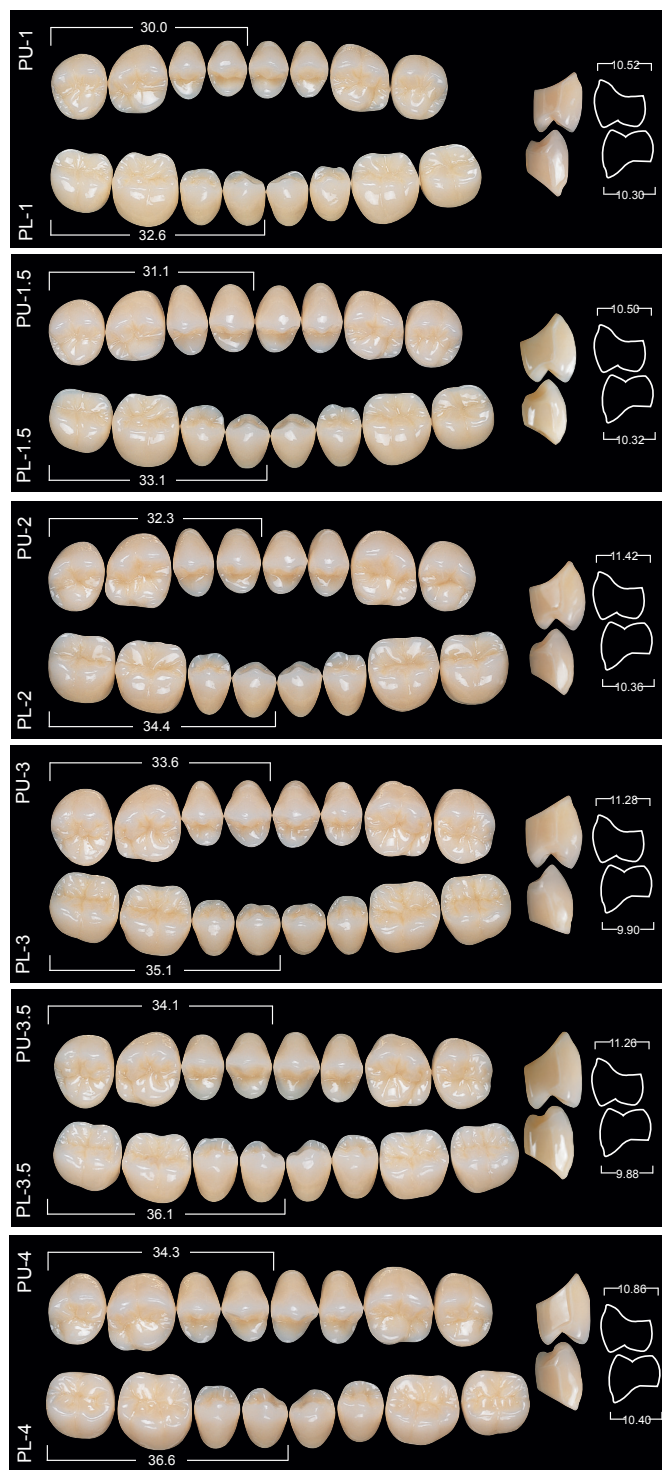

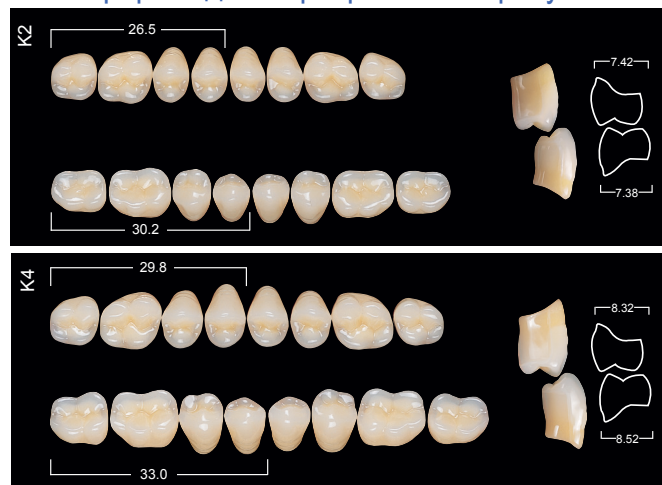


K-формы для перекрестного прикуса



# Таблица комбинирования

Данная комбинационная таблица приводится в качестве рекомендации. В зависимости от конкретных анатомических особенностей, возможны другие варианты

Передние зубы		Боковые зубы			
верхние	нижние	<b>P</b> DCL пластмасса Для частичного протезирования	<b>N</b> Пластмасса Нормальный прикус	<b>K</b> Пластмасса Перекрестный прикус	<b>T</b> Пластмасса Глубокое перекрытие
					
A 11	A 3	PU-1 / PL-1	N 3	K 2 / K 4	T4
A 12	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3	K 2 / K 4	T4
A 13	A 5	PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 4	T4
A 14	A 6 / A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4
A 15	A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6
** A 16	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4 / T6
A 17	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4
A 66	A 5 / A 7	PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4
A 68	A 7	PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4	N 4 / N 5	K 4	T4
** A 69	A 7 / A 8	PU-4 / PL-4	N 4 / N 6	K 4	T4 / T6
					
A 22	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4
A 24	A 2	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4
A 24 B	A 4 / A 5	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4
A 25	A 9	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 4	K 4	T4
** A 26	A 7	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6
A 27	A 8	PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4
A 41	A 3 / A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4
A 42	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 4	T4
A 44	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4
					
A 32	A 3 / A 5	PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4
A 36	A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4
** A 37	A 7 / A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 5	K 4	T4 / T6
A 54	A 5	PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3	N 5	K 4	T4
A 56	A 7 / A 8	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4

\*\* Формы A6, A26, A37, A69 доступны только для линий зубов SR Vivodent DCL и SR Vivodent PE

## Формы поставки

	Название линии зубов	Chromascop	A-D	PE
Фронтальные	Ivocryl	539460	630598	
	SR Vivodent DCL	611630	564852	
	SR Vivodent PE			504375
	SR Vivodent	540260		
Боковые	Ivocryl	539610	630599	
	SR Postaris DCL	543104	572073	
	SR Orthotyp DCL		565587	
	SR Orthotyp PE			522751
	SR Orthotyp	540050		

## Определение цвета

Выбор цвета для пациента должен производиться при определенных условиях освещенности (интенсивность света должна соответствовать 5500 градусов К) или при дневном свете. Для оптимального определения цвета зуба по шкале A-D, Bleach или Chromascop в Вашем распоряжении находится соответствующая расцветка. Зубы расцветки Ivocryl соответствуют по материалу и расположению слоев оригинальным зубам Ivocryl. Таким образом, отклонения цвета сводятся к минимуму. Выбор цвета может также осуществляться с помощью универсальных расцветок A-D, Bleach или Chromascop.

### Определение цвета с помощью расцветки SR Vivodent® PE

Зубы в расцветке соответствуют по материалу и расположению зубам PE. Это идеальный инструмент для определения цвета зубов линий:

- SR Vivodent PE
- SR Orthotyp PE
- SR Orthosit PE

<b>Расцветка SR Vivodent PE</b>		538318
<b>Расцветка Chromascop</b>		529479
<b>Расцветка A-D</b>		
Комплект расцветок (16 и 4 цвета)		628587
Базовая расцветка (16 цветов)		628623
Цвета Bleach (4 цвета)		628605
<b>Расцветка Ivocryl A-D</b>		630535
<b>Шкафы для зубов</b>		
Z4 (44 x 44,5 x 10,5 см)	4	540307
Z6 (44 x 44,5 x 15 см)	6	540308
Z12 (44 x 44,5 x 29 см)	12	540309
Ящик для шкафа		539132
Вставка в ящик	<b>гарнитур 6 шт.</b>	541651
	<b>гарнитур 8 шт.</b>	541652



CE 0123  
ISO 22112 2005

Изображения и данные не являются гарантией свойств.

Отпечатано в РФ

© Ivoclar Vivadent AG, Шаан/Лихтенштейн

Производитель:  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL 9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel.: +423 / 235 35 35  
Fax: +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

**ООО «Ивоклар Вивадент»**  
115432, Проспект Андропова,  
д. 18 корп. 6, офис 10-06.  
info.ru@ivoclarvivadent.com  
Тел. +7 499 418 03 00  
Факс: +7 418 03 10  
www.ivoclarvivadent.ru